



Belivair®

HYGIÈNE DU NEZ

Eau de mer



POURQUOI AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE NASALE AU QUOTIDIEN ?

Directement au contact de l'environnement, la muqueuse nasale constitue la première barrière de protection du système respiratoire contre les agressions extérieures (*fumée, froid, pollution, virus...*) en filtrant l'air inspiré.

Le nez a donc une fonction de régulation indispensable pour l'équilibre du système respiratoire.

Le lavage nasal à l'eau de mer permet ainsi d'améliorer son fonctionnement physiologique.

Un lavage nasal quotidien permet de :

- Maintenir les fosses nasales propres et hydratées afin que le nez accomplisse parfaitement ses missions.
- Favoriser l'élimination des particules inhalées.
- Humidifier la muqueuse en cas de nez sec ou bouché.

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DE BELIVAIR HYGIÈNE DU NEZ ?

Belivair HYGIÈNE DU NEZ est adapté au **lavage nasal quotidien des adultes et des enfants à partir de 3 mois.**

Belivair HYGIÈNE DU NEZ est un **spray nasal 100% naturel, contenant une solution d'eau de mer riche en oligo-éléments marins**, qui :

- Nettoie les fosses nasales en douceur.
- Humidifie la muqueuse nasale.
- Diminue la viscosité des sécrétions nasales et facilite leur élimination.

QUAND UTILISER BELIVAIR HYGIÈNE DU NEZ ?

- **Pour une hygiène quotidienne** : 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine le matin et le soir.
- **Dès les premiers symptômes du rhume ou de la rhinite** : Renouveler les pulvérisations aussi souvent que nécessaire pour bien dégager le nez et éliminer l'excès de mucosités, dans la limite de 6 pulvérisations par jour et par narine.

Le produit étant à base d'eau de mer naturelle, **l'utilisation est possible durant la grossesse et l'allaitement.**

Si vous utilisez un autre produit local pour un rhume ou une rhinite allergique en association avec Belivair HYGIÈNE DU NEZ, il est recommandé d'utiliser Belivair HYGIÈNE DU NEZ avant l'autre produit nasal, en raison de ses propriétés nettoyantes.

COMMENT UTILISER BELIVAIR HYGIÈNE DU NEZ ?

1. Se moucher avant et après utilisation.
2. Incliner la tête sur le côté et introduire l'embout délicatement dans la narine opposée.
3. Exercer une pression franche et brève.
4. Répéter l'opération dans l'autre narine.
5. Renouveler jusqu'à dégagement complet des fosses nasales dans la limite

de 3 pulvérisations par narine.

6. Laver soigneusement l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation et le sécher à l'air.

7. Reboucher le spray nasal à l'aide du capuchon.

Il est préférable d'utiliser un seul spray nasal par personne.

QUE CONTIENT BELIVAIR HYGIÈNE DU NEZ ?

Eau de mer isotonique riche en oligo-éléments marins.

Eau purifiée.

Produit 100% naturel - Sans conservateur.

Gaz propulseur : air comprimé.

Il n'est pas en contact avec la solution.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à un ou plusieurs composants.

En cas de muqueuse irritée, des sensations de picotements peuvent survenir au cours de l'utilisation.

L'embout physiologique avec sa collerette de sécurité permet une utilisation chez l'enfant à partir de 3 mois.

En cas de questions ou si les symptômes persistent, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

Belivair HYGIÈNE DU NEZ est un spray nasal sous pression qui peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les positions.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ?

Tenir le produit hors de la portée et la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

Spray nasal sous pression: ne pas percer, ni brûler même après utilisation.

Tenir à l'écart des rayons directs du soleil.

Ne pas exposer à une température de plus de 50°C.

Stocker à température ambiante.

Spray nasal 125ml e

Dispositif médical de classe II a

Dernière mise à jour : 04- 2020

Marquage CE : 2001

FABRICANT :

Laboratoires Chemineau
93 route de Monnaie
37210 VOUVRAY - France

DISTRIBUTEUR :

Therabel Lucien Pharma
19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris - France



0459

AN1401 0001

THERABEL 