

# Belivair<sup>®</sup> COLLUTOIRE

## DISPOSITIF MÉDICAL

**Composition : grand plantain, Erysimum, réglisse et menthe**

**PROTÈGE LA GORGE - SOULAGE LA DOULEUR**

### 1. IDENTIFICATION, COMPOSITION ET OBJET DU DISPOSITIF MÉDICAL

La muqueuse des voies respiratoires est sensible aux attaques par les agents pathogènes, polluants et irritants environnementaux, qui peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et atteindre le pharynx, les bronches et les poumons, provoquant une inflammation et des allergies.

La capacité à créer une barrière protectrice constituée de substances aux propriétés mucoadhésives contribue à accroître les défenses de la muqueuse oropharyngée.

Le **collutoire Belivair<sup>®</sup>** est un dispositif médical recommandé pour soulager les irritations des voies respiratoires supérieures et les symptômes fréquemment associés comme la douleur, la gêne à la déglutition, les sensations de brûlure et la sécheresse.

#### 1.1 MÉCANISME D'ACTION

Les polysaccharides contenus dans les extraits végétaux, en synergie avec le hyaluronate de sodium, créent un film mucoadhésif protecteur présentant un effet barrière, permettant de limiter le contact avec les agents externes et irritants.

Le **collutoire Belivair<sup>®</sup>** constitue un adjuvant utile pour le traitement des maux de gorge, également associés à une pharyngite, grâce à son effet apaisant sur la muqueuse irritée.

Le **collutoire Belivair<sup>®</sup>** est également recommandé pour protéger les membranes muqueuses contre les agressions extérieures telles que le froid, la fumée, la pollution et la poussière.

#### 1.2 COMPOSITION

Eau, fructose, alcool, extrait hydroglycériné de grand plantain (Plantago major), extrait hydroalcoolique d'herbe aux chantres (Erysimum), extrait aqueux mou de réglisse, hyaluronate de sodium, huile essentielle de menthe, menthol, anéthole.

### 2. CONDITIONNEMENT

Flacon de 20 ml

### 3. POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

**Adultes et enfants de plus de 12 ans :**

3 pulvérisations jusqu'à 3 fois par jour.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans. Bien agiter avant utilisation. Le pulvérisateur permet une administration ciblée et localisée du produit.

### 4. EFFETS SECONDAIRES

Les composants du **collutoire Belivair<sup>®</sup>** sont généralement bien tolérés.

Aucun effet secondaire du produit n'est connu ni attendu. Si vous présentez un effet secondaire inattendu, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

### 5. INTERACTIONS AVEC LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET LES MÉDICAMENTS

Aux doses présentes dans le produit, les composants du **collutoire Belivair<sup>®</sup>** peuvent interagir avec des médicaments vitaux agissant sur le cœur. Si vous êtes traité(e) par ce type de médicaments, vous ne devez pas utiliser le collutoire.

Le **collutoire Belivair<sup>®</sup>** peut interférer avec le métabolisme hépatique de médicaments tels que les diurétiques, les antiasthmatiques, les laxatifs, la calcitonine et les anti-inflammatoires et les contraceptifs oraux.

Nous vous recommandons de consulter votre médecin si vous suivez un traitement médicamenteux.

Le **collutoire Belivair<sup>®</sup>** contient de la réglisse, qui peut neutraliser l'action antihypertensive de certains médicaments délivrés sur ordonnance ; consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous prenez des médicaments. En règle générale, il est conseillé de prendre le produit deux heures avant ou après tout médicament ou complément alimentaire.

## 6. MISE EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le **collutoire Belvair®** contient de l'alcool. Ne pas l'utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.

Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas prendre en cas d'intolérance au produit.

Ne pas prendre en cas d'hypersensibilité connue aux composants.

En cas de hernie hiatale ou de sténose de l'œsophage, consultez votre médecin avant de commencer à prendre le produit.

En raison de la présence de réglisse, le produit ne doit pas être pris en cas d'hypertension artérielle. Les patients prenant un médicament contenant de la réglisse ne doivent pas prendre d'autres produits à base de réglisse, en raison d'un risque d'événements indésirables graves, comme une rétention d'eau, une hypokaliémie, une hypertension artérielle, des troubles du rythme cardiaque. Consultez votre médecin pour plus d'informations.

En cas d'inflammation chronique de la bouche ou du pharynx, vous ne devez prendre le produit que sur avis médical.

Ne pas dépasser la dose recommandée. En cas d'effets indésirables, suspendre l'utilisation et consulter un médecin.

Ne pas utiliser en cas de lésions de la bouche.

Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé.

Ne pas utiliser le **collutoire Belvair®** pendant plus de 30 jours consécutifs ; si les symptômes persistent pendant plus d'une semaine au cours de l'utilisation du produit ou en cas de fièvre, consulter un médecin.

## 7. CONSERVATION

Conserver le **collutoire Belvair®** dans un endroit sec et à l'abri de sources directes de chaleur ou de lumière.

Ne pas utiliser si le conditionnement est abîmé.

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température contrôlée (entre 8 °C et 25 °C).

## 8. DATE D'EXPIRATION

Ne pas utiliser après la date d'expiration imprimée sur le conditionnement.

La date d'expiration s'applique sous réserve de conservation du produit dans son conditionnement non endommagé.

Utiliser le produit durant un mois après ouverture.

## 9. ÉLIMINATION

Après expiration, le dispositif doit être éliminé conformément aux réglementations locales relatives au traitement des déchets.

Ne jamais jeter le produit ou son emballage dans l'environnement.

**Date de la dernière révision : Mars 2020**

**Autorisation UFT n. IT00MIX01893R**  
**Hydrate 20 ml – Anhydre 4 ml**  
**Ethanol 20% Vol.**

 SIIT srl  
Via Ariosto 50/60  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)  
Italie

### DISTRIBUTEUR :

Therabel Lucien Pharma  
19 rue Alphonse de Neuville  
75017 Paris – France



Évaluer votre satisfaction concernant votre utilisation de ce produit, nous vous remercions de bien vouloir nous accorder cinq minutes de votre temps, afin de compléter un questionnaire accessible en suivant le lien ou en scannant le QR code ci-dessous : [www.siiit-pms.com/belvair-mal-de-gorge-collutoire](http://www.siiit-pms.com/belvair-mal-de-gorge-collutoire)



**THERABEL** 